


WWW.RETTUNGSTUCH.COM



GEVAK

EVAKUIERUNGSTUCH

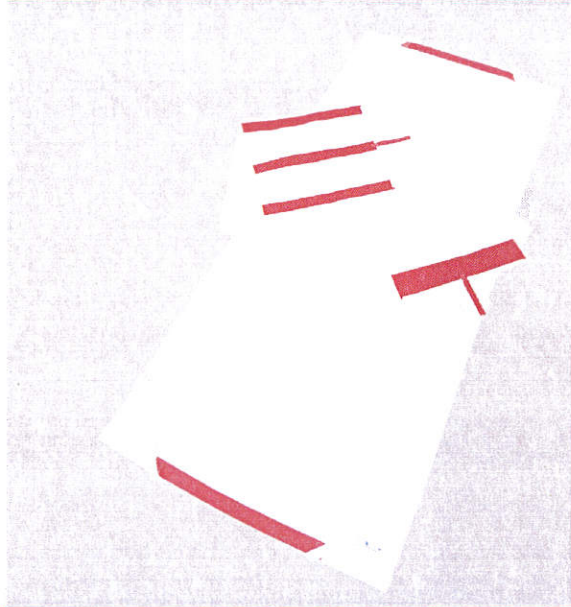

GELSENKIRCHENER
WERKSTÄTTEN 

Gelsenkirchener Werkstätten für
angepaßte Arbeit gGmbH

Braukämperstraße 100
45899 Gelsenkirchen

Telefon: 0209 95896-0

Telefax: 0209 95896-77

E-Mail: sales@rettungstuch.com

www.rettungstuch.com

Prévention Incendie Luxembourg
Société Anonyme



16 Zare Ouest
L - 4384 Ehlerange

T. (+ 352) 24 55 97 40
F. (+ 352) 24 55 97 48

info@pilsa.lu
www.pilsa.lu

 **WERKVEREIN**
GELSENKIRCHEN E.V.

Die Gelsenkirchener Werkstätten
sind eine Gesellschaft des Werkver-
ein Gelsenkirchen.

RETTEN — BERGEN — EVAKUIEREN

GEVAK



Prévention Incendie Luxembourg
Société Anonyme



16 Zare Ouest
L - 4384 Ehlerange

T. (+ 352) 24 55 97 40
F. (+ 352) 24 55 97 48
info@pilsa.lu
www.pilsa.lu

Einfach und leicht: Mit dem Evakuierungstuch kann eine immobile liegende Person umgehend aus dem Krankenbett in Sicherheit transportiert werden. Nur eine Rettungsperson ist nötig, um eine schnelle und sichere Evakuierung

durchzuführen. Das robuste Material des Tuchs ermöglicht das Ziehen der Person über nahezu alle Bodenbeläge mit geringem Kraftaufwand. Dabei sind auch Treppen kein Hindernis.



Das Evakuierungstuch wird dauerhaft unter der Matratze positioniert und über Schlaufen befestigt. Die Matratze kann wie gewohnt in sichere Bereiche bezogen werden.

Es entsteht eine U-Form der Matratze, die die Stabilität wesentlich erhöht. An den roten Gurten kann die Matratze in sichere Bereiche gezogen werden.

Sofort einsatzbereit: Seitlich sind zwei Textil-Flügel integriert, die mit Klettverschlüssen versehen sind. Im Rettungsfall werden die Flügel einfach aus seitlichen Taschen unter der Matratze gezogen.

Produktinformationen:

Maße: 210 x 85 cm

Material: Polyamid/
Nylon-6-Gewebe
atmungsaktiv

max. Zuglast: 150 kg

Waschbar: bis 60° C

Trockner: geeignet

Fixieren und Transportieren:

Die Flügel werden über den Patienten gelegt und durch die Klettverschlüsse fest verbunden.